



Guía de Activación del Nuevo Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

Las funciones disponibles dependerán del dispositivo con el que el usuario activa el sensor.

Si inicias el Sensor con la App FreeStyle LibreLink¹, permite experimentar el total de funcionalidades del Sistema.

Con la App, recibe las alarmas² y valores de glucosa en tiempo real.



Descubre más aquí



Para usuarios de la App FreeStyle LibreLink¹ con el nuevo sensor FreeStyle Libre 2 plus



Para usuarios de FreeStyle Libre 2 Lector

Iniciar nuevo sensor con la App

Iniciar nuevo sensor con el Lector

Lecturas de glucosa en tiempo real³



Las alarmas en tiempo real³ están disponibles si usas la App.



Alarmas Opcionales²



Cuando la app es el Segundo dispositivo, no tendrá disponible las alarmas (solo estarán en el Lector)



Las alarmas opcionales² son activadas en el primer dispositivo donde inicies el sensor FreeStyle Libre 2 Plus

Escaneo de lecturas de glucosa



Puedo usar ambos dispositivos al mismo tiempo?

Lector como Segundo dispositivo



Podrás usar los 2, siempre y cuando inicies tu sensor en el lector, desde FreeStyle LibreLink¹, no podrás usar el lector.



Las alarmas² aparecerán sólo en el dispositivo que se inició el sensor FreeStyle Libre 2 Plus

FreeStyle LibreLink 
Descarga aquí la App gratuita



 **Abbott**
life. to the fullest.®

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Imágenes con fines ilustrativos, no pertenecen a pacientes reales. 1. La aplicación FreeStyle LibreLink solo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo antes de usar la aplicación. El uso de la aplicación FreeStyle LibreLink puede requerir el registro en LibreView. La transferencia de datos de glucosa entre aplicaciones depende de la conectividad a Internet y de la velocidad de red de FreeStyle, LibreLink y LibreLinkUp. La app FreeStyle LibreLink es solo compatible con ciertos teléfonos, para conocer los modelos compatibles revise la guía de compatibilidad: <https://bit.ly/3ITOrhL>. 2. La versión 2.111 de la aplicación FreeStyle LibreLink introduce alarmas de glucosa opcionales cuando se utiliza con un sensor FreeStyle Libre 2 Plus. Las notificaciones solo se recibirán cuando las alarmas estén encendidas y el sensor esté a menos de 6 mt sin obstrucciones del dispositivo de lectura. Debe habilitar la configuración adecuada en su teléfono inteligente para recibir alarmas y alertas, consulte el Manual del usuario de FreeStyle Libre 2 para obtener más información. 3. Las lecturas de glucosa se muestran automáticamente en la aplicación solo cuando el celular y el sensor están conectados y dentro del alcance. La cubierta del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Abbott Laboratories Chile, Ltda. ©2024 Abbott ADC-93821 v2.0

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Imágenes con fines ilustrativos, no pertenecen a pacientes reales. 1. La aplicación FreeStyle LibreLink solo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo antes de usar la aplicación. El uso de la aplicación FreeStyle LibreLink puede requerir el registro en LibreView. La transferencia de datos de glucosa entre aplicaciones depende de la conectividad a Internet y de la velocidad de red de FreeStyle, LibreLink y LibreLinkUp. La app FreeStyle LibreLink es solo compatible con ciertos teléfonos, para conocer los modelos compatibles revise la guía de compatibilidad: <https://bit.ly/3ITorhl>. 2. La versión 2.11.1 de la aplicación FreeStyle LibreLink introduce alarmas de glucosa opcionales cuando se utiliza con un sensor FreeStyle Libre 2 Plus. Las notificaciones solo se recibirán cuando las alarmas estén encendidas y el sensor esté a menos de 6 mt sin obstrucciones del dispositivo de lectura. Debe habilitar la configuración adecuada en su teléfono inteligente para recibir alarmas y alertas, consulte el Manual del usuario de FreeStyle Libre 2 para obtener más información. 3. Las lecturas de glucosa se muestran automáticamente en la aplicación solo cuando el celular y el sensor están conectados y dentro del alcance. La cubierta del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Abbott Laboratories Chile, Ltda. ©2024 Abbott ADC-93821 v2.0